

❖ 採取容器へのラベル添付方法

<p>長いスピッツ (茶、緑、黒、モカ、ピンクなど)</p> <p>ラベルの高さ注意 ゴムキャップの先端が完全に 見える位置</p> <p>ゴムキャップの先端 が完全に 見える位置 で貼ってください○</p> <p>斜めに貼らない× 横向きに貼らない×</p>	<p>コップ小 (新鮮尿)</p> <p>ラベルの高さ注意 ラベル上部が 150mlライン より下</p> <p>ラベルの上部が 「150mlライン」より下 で貼ってください○</p> <p>カップの蓋に貼らない× 横向きに貼らない×</p>
<p>短いスピッツ (ED2K紫など)</p> <p>ラベルの高さ注意 ゴムキャップの先端がすべ て隠れる位置</p> <p>ゴムキャップの先端 がすべ て隠れる位置 で貼ってください○</p> <p>斜めに貼らない× 横向きに貼らない×</p>	<p>滅菌コップ</p> <p>コップ側面に縦向き に貼ってください○</p> <p>コップの蓋に貼らない× 横向きに貼らない×</p>
<p>滅菌短T (滅菌試験管もこれに準じる)</p> <p>スピッツの中央部に 縦向きに貼ってください○</p> <p>斜めに貼らない× 横向きに貼らない×</p>	<p>滅菌綿棒</p> <p>綿棒の中央部に 縦向きに貼ってください○</p> <p>キャップ上に貼らない× 横向きに貼らない×</p>
<p>注射器 (血液ガス)</p> <p>シリンジ外筒部に 貼ってください○</p> <p>コップ等に貼らない× シリンジ内筒部に貼らない× 巻き付けて貼らない×</p>	<p>血液培養ボトル</p> <p>ボトルの中央部に 縦向きに貼ってください○</p> <p>細い部分にまきつけない× 斜めに貼らない× 横向きに貼らない×</p>